



Smartz™ - Schnellstart

1. Verbinden Sie den Smartz®-Pod mit dem Smartz®-Slip.

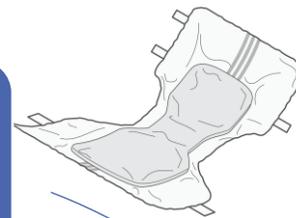

2. Erstellen Sie Ihr Benutzerkonto Smartz®-Dashboard. Befolgen Sie dabei die Eingabeaufforderungen oder melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten an.

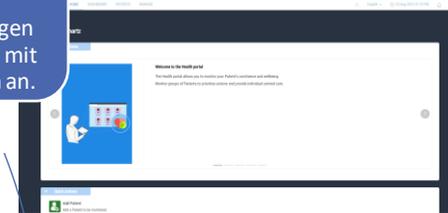

3. Folgen Sie den Anweisungen, um Patienten über das Dashboard hinzuzufügen.




Add Patient
Add a Patient to be monitored.

4. Um Ihren Patienten einzurichten, überprüfen Sie die angegebene Nummer auf dem Deckel des Smartz® Pods



5. Verbinden Sie den Pod mit dem Slip und warten Sie, bis das grüne Licht auf dem Pod blinkt. Überprüfen Sie das grüne Symbol auf dem Dashboard.

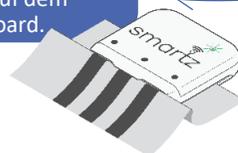

7. Überprüfen Sie die Nachrichten mit der Smartz®-Benachrichtigungs-App überall, wo Sie Internetempfang haben.



6. Die auf dem Dashboard angezeigten Symbole geben an, welche Pflege erforderlich ist.

