


1. Prepara il pod Smartz® e il pannalone di Smartz®.


2. Crea il tuo account utente nella dashboard di Smartz® seguendo le istruzioni o accedi con i tuoi dati utente.



3. I pazienti possono essere aggiunti alla dashboard seguendo le istruzioni.

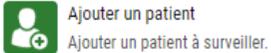


4. Per configurare il paziente, controlla il numero del pod di Smartz® visualizzato all'interno del coperchio.

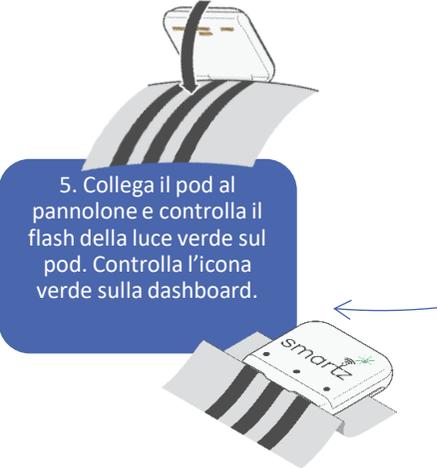

5. Collega il pod al pannalone e controlla il flash della luce verde sul pod. Controlla l'icona verde sulla dashboard.

7. Controlla le notifiche tramite l'app Notification di Smartz®, ovunque ci sia copertura internet.

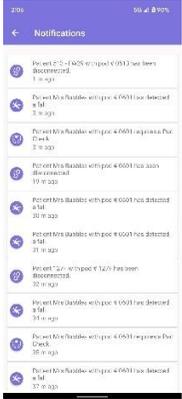

6. Visualizza le icone mostrate sulla dashboard per sapere quale cura è richiesta.



# Démarrage rapide de Smartz®